



SILLA SALVAESCALERAS

STR-L



¡VIVE SIN BARRERAS!

En este manual le indicaremos el fácil uso de la silla salvaescaleras de tramo recto modelo STR-L:



1. Palanca de Mando:

Para hacer que la silla se ponga en marcha, empuje y sostenga el mando en la dirección en que desea viajar, después de unos segundos, el salvaescaleras comenzará a moverse, siempre manteniendo el mando en pulsación continua hasta que llegue a la parte superior / inferior del rail.

2. Control Remoto

Puedes usar el control remoto para mover la silla y viajar en ella. Presionando el botón de la flecha hacia arriba en el control remoto puedes subir a la planta superior y presionando la flecha hacia abajo la silla salvaescaleras se desplaza hacia la zona inferior de la escalera aparcando en su sitio.

3. Cinturón de Seguridad Retráctil

Tire la hebilla del cinturón de seguridad hacia afuera y colóquela a través del cuerpo, luego abróchela en un botón rojo. Una vez que la silla se haya detenido y estará listo para desabrocharse, sujete el cinturón y presione el botón rojo para soltarlo. El cinturón se retraerá del botón.

4. Asiento giratorio

Su salvaescaleras viene equipado con una palanca giratoria de serie una vez que alcanza la parte superior de las escaleras, tire de la palanca hacia arriba. Esto permitirá que el asiento gire hacia afuera para que pueda bajarse fácilmente para girar hacia atrás, levante la palanca nuevamente y gire nuevamente a la posición, una vez que suelte la palanca se colocará en su posición de forma segura.

Si tiene un eslabón giratorio mejorado: empuje el joystick cuando llegue a la parte superior para girar. Suelte el joystick para detenerse o espere a que alcance su límite. No se preocupe, la silla salvaescaleras no le permitirá girar demasiado. Para girar hacia atrás, empuje el joystick hacia abajo.

5. Brazos de Seguridad

Para mayor seguridad, el salvaescaleras está equipado con dos brazos de seguridad. Los brazos deben estar en su posición inferior para poder moverse.

6. Bordes de Seguridad

Si la silla salvaescaleras tuviese algún contacto con algún objeto durante el trayecto, la silla se detendrá por seguridad. El objeto debe ser retirado para que la silla pueda continuar el viaje con normalidad hasta llegar al destino deseado. Siempre debe estar libre sin obstáculos el trayecto de la silla.

7. Controles en el reposabrazos

Ubicado en el reposabrazos de la silla salvaescaleras se encuentra: la pantalla de Display, Interruptor de llave y el Interruptor de retención.

El display dice en tiempo real lo que la silla salvaescaleras está haciendo en el momento.

- **LIFT READY:** La silla salvaescaleras está lista para usar.
- **MOVING UP:** La silla salvaescaleras está subiendo.
- **MOVING DOWN:** La silla salvaescaleras está bajando.
- **ARRIVED TOP:** La silla salvaescaleras ha llegado a la cima (arriba).
- **ARRIVED BOTTOM:** La silla salvaescaleras ha llegado a la zona inferior.
- **SEAT SWIVEL:** El asiento de la silla ha girado completamente.
- **SERVICE:** La silla salvaescaleras está lista para el servicio.
- **KEY SWITCH:** la llave debe ser insertada y colocar en la posición de encendido (ON). Para desactivar la silla gire a la posición apagado (OFF). La llave también se puede quitar para mayor seguridad.

- **HOLDING SWITCH:** El interruptor de retención puede encender y apagar su silla salvaescaleras.

Ambos, KEY SWITCH y HOLDING SWITCH deben estar encendidos para que la silla salvaescaleras pueda operar.

8. Corte de energía

Interruptor de Energía ON/OFF, El interruptor de energía interrumpe el suministro de la batería. Le recomendamos que lo deje encendido a menos que tenga un corte de energía. Durante un corte de energía, estando apagado el interruptor maximizará la capacidad de la batería para su uso.

En el momento de un corte de energía o si la silla salvaescaleras se detiene durante el recorrido (viaje) usted puede enrollar con la herramienta de cuerda manual provista.

- Apagar usando el botón de ON/OFF (encendido/apagado)
- Retirar la tapa blanca
- Inserte manualmente la bobina en el eje
- Gire hacia la derecha para moverse hacia arriba y hacia la izquierda para moverse hacia abajo.